

clinell®



KLORHEKSIDIN ŠAMPON KAPA

Antiseptična kapa
za čišćenje pacijenata

HLOORHEKSIDIN ŠAMPON KAPA

KLINIČKE PREDNOSTI

- Jednostavno rešenje za antiseptično čišćenje kose bez ispiranja
Mekana, impregnirana šampon kapa je namenjena čišćenju, dezinfekciji i vlaženju kose u jednom koraku.
- Isključuje upotrebu lavora sa vodom za kupanje pacijenata
- Obezbeđuju brzo baktericidno dejstvo
Pomažu smanjenju širokog spektra mikroorganizama koji uzrokuju infekcije.
- Produženo rezidualno dejstvo i zaštita
- Idealne za kupanje - pranje kose u krevetu na intenzivnim negama i pre prijema pacijenata u bolnicu
- 1 velika šampon kapa obezbeđuje konzistentnu pokrivenost hlorheksidinom koji pomaže u čišćenju, dezinfekciji i osvežavanju kose pacijenata
- U sladu sa različitim, različitim testiranjima koja su vršena ^{1,2,3,4}
- Mogućnost zagrevanja u mikrotalasnoj pećnici
Kapa se može koristiti na sobnoj temperaturi ili zagrejana u Clinell mikrotalasnoj pećnici pomoću koje se dobije topla kapa za par sekundi.

DETALJI

Kako hlorheksidin kapa deluje?

Kapa sadrži 2% *chlorhexidine gluconate* sastojak koji uništava sve štetne bakterije koje se nalaze u kosi i na koži glave. Hlorheksidin se lepi za kožu i kosu i dugotrajno stvara nevidljivu barijeru, odnosno zaštitu od bakterija. Šampon kapa omogućava pacijentima koji su duži period u bolnici dodatnu zaštitu.

Kako se koriste Clinell hlorheksidin šampon kape?

Clinell hlorheksidin šampon kapa je vrlo jednostavna za upotrebu i može se koristiti zagrejana (u Clinell ili nekoj drugoj mikrotalasnoj pećnici) ili hladne (direktno iz pakovanja). U svakom pakovanju se nalazi jedna velika kapa. Svaka kapa je predviđena za pojedinačnu upotrebu i služi za čišćenje i dezinfekciju kose i kože na glavi.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU



1. Kapa se može koristiti nezagrejana ili zagrejana. Da bi se kapa zagrejala, staviti je u mikrotalasnu pećnicu na otprilike 15 sekundi.

2. Ako se kapa zagreva, proveriti temperaturu pre stavljanja na glavu. Voditi računa da se pokrije cela kosa.

3. Masirati celu površinu glave 2-3 minuta kako bi sva kosa upila rastvor.

4. Da bi i duga kosa bila dobro oprana, prilikom skidanja kape protrljati krajeve kose.

5. Skinuti kapu i kosu prosušiti peškirom ako je potrebno.

6. Odložiti kapu u odgovarajuću kantu za otpad.



SADRŽI
2% CHLORHEXIDINE GLUCONATE KOJI UNIŠTAVA ŠTETNE BAKTERIJE KOJE SE NALAZE NA KOSI I KOŽI GLAVE

ISTRAŽIVANJA

1. Edmiston CE Jr et al. Preoperative shower revisited: can high topical antiseptic levels be achieved on the skin surface before surgical admission? *J Am Coll Surg.* 2008 Aug;207(2):233-9.
2. Bleasdale SC et al. Effectiveness of chlorhexidine bathing to reduce catheter-associated bloodstream infections in medical intensive care unit patients. *Arch Intern Med.* 2007 Oct 22;167(19):2073-9.
3. Vernon, MO et al. Chlorhexidine Gluconate to Cleanse Patients in a Medical Intensive Care Unit. The Effectiveness of Source Control to Reduce the Bioburden of Vancomycin-Resistant Enterococci. *Arch Intern Med.* 2006;166:306-312.
4. Barbara DeBaun Evaluation of the Antimicrobial Properties of an Alcohol-free 2% Chlorhexidine Gluconate Solution. *AORN J* 87 (May 2008) 925-933.

KORISTITI DEZIFICIJENSE BEZBEDNO. UVEK PROČITATI PODATKE O PROIZVODU I UPUTSTVO PRE UPOTREBE.

* Mikrotalasne pećnice se razlikuju. Uvek proveriti temperaturu kape pre upotrebe.

NAZIV PROIZVODA

Hlorheksidin šampon kapa

JEDINICA PAKOVANJA

1 elastična kapa

VELIČINA

29 cm prečnik