

SADRŽAJ ETIKETE/UPUTSTVA BIOCIDNOG PROIZVODA

Clinell univerzalne maramice za dezinfekciju

Sastav:

Aktivne supstance:

100gr biocidnog proizvoda sadrži:

0,45 g Kvaternerna amonijum jedinjenja, benzil C12-C16-alkildimetil, hloridi CAS 68424-85-1

0,40 g Didecildimetilamonijum hlorida CAS 7173-51-5

0,10 g Poliheksametilen biguanid hidrohlorida (PHMB) CAS 27083-27-8.

0,05 g 2-fenoksietanola CAS 122-99-6

<5% propilen glikol, miris. Spisak svih sastojaka se nalazi na pakovanju.

Štetno za živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama.

Sadrži poliheksametilen biguanid hidrohlorid (PHMB) CAS 27083-27-8. Može da izazove alergijsku reakciju.

Odlaganje sadržaja / ambalaže u skladu sa nacionalnim propisima.

Količina: 200 kom (ili 40 kom)

Proizvođač: GAMA HEALTHCARE Ltd., The Maylands Building, Maylands Avenue, Hemel Hempstead, Hertfordshire, HP2 7TG, Velika Britanija, Tel: +44 (0) 207 993 0030, www.gamahealthcare.com, mail: info@gamahealthcare.com

Uvoznik/Nosilac rešenja: Bimida d.o.o., Žorža Klemansoa 12, 11 000 Beograd, tel: +381 11 3391478

Broj rešenja za stavljanje u promet br. 532-01-589/2010-03, datum 2.4.2013.

Vrsta formulacije biocidnog proizvoda: maramice

Predviđena oblast primene biocidnog proizvoda:

- Dezinfekcija površina, opreme i nameštaja:

*u domaćinstvu i kuhinjama: dezinfekcija slavina, kuhinjskih površina i unutrašnjosti frizidera, dezinfekciju decijih igračaka i stolova za prepovijanje beba, dezinfekcija tastatura

*u toaletima: dezinfekciju toaletne daske, slavina

*u zdravstvenim ustanovama: dezinfekcija stočića pored pacijenta, telefona, okvira kreveta, rukohvata, kvaka, stomatoloških stolica, invalidskih kolica, radnih površina, reflektora u stomatologiji

Uputstvo za upotrebu:

Površine, predmete i opremu koja se dezinfikuje prebrisati vlažnom maramicom tokom najmanje 30 sekundi i ostaviti da se osuši.

Ukoliko se radi o jako zaprljanim površinama (krvlju zaprljane površine i sl) potrebno je prethodno uraditi mehaničko čišćenje i sanitarno pranje a zatim dezinfikovati vlažnom maramicom.

Posle brisanja maramicom, površine koje dolaze u kontakt sa hranom i dečije igračke isperite vodom za piće.

Maramica je aktivna, deluje kao dezinficijens, sve dok je vlažna.

Doza : 2 – 10 maramica dnevno u zavisnosti od zaprljanosti tretirane površine. Cela tretirana površina mora biti ovlažena tečnošću iz važne maramice.

Nema perioda zabrane za pristup površinama tretiranim biocidnim proizvodom. Pridržavati se uputstva za upotrebu.

Sa ostacima proizvoda postupati u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“ br. 36/09 i 88/10, 14/16, 95/18, 35/23), a sa iskorišćenom ambalažom u skladu sa Zakonom o ambalaži i ambalažnom otpadu („Službeni glasnik RS“ br. 36/09, 95/18).

Rok upotrebe: utisnuto na pakovanju

Broj serije: LOT: utisnuto na pakovanju